

DIALZIMA NEW

Detergente Enzimatico per il lavaggio di dispositivi medici

Proprietà

"Sistema detergente" ad azione enzimatica a schiuma controllata specifico per la preliminare rimozione di sangue e contaminanti organici dai dispositivi medici da sottoporre a successiva disinfezione o sterilizzazione. E' indicato per lavaggi manuali ad immersione, per lavastrumenti e ultrasuoni.

Campi di applicazione

Lavaggio e pulizia di strumentario in chirurgia, gastroenterologia, urologia, ortopedia, ginecologia, odontoiatria, ematologia. Per la pulizia di endoscopi, vetreria da laboratorio, strumenti in plastica e gomma.

Caratteristiche chimico fisiche

aspetto:	liquido
densità 15°C:	1,058
pH tal quale:	8,0 ± 0,5
solubilità:	completamente solubile in acqua

Dosi e Modalità di impiego

2 ml. in un litro di acqua meglio se a 40°C. Versare il prodotto nell'acqua, immergere gli strumenti nella soluzione quindi risciacquare abbondantemente con acqua prima di inviarli alla disinfezione e/o sterilizzazione.

Tempi di contatto nella soluzione: da 1 a 5 minuti a seconda del grado di sporco.

Composizione: (Reg 648/2004 CE)

tensioattivi anionici non ionici	> 30%
miscela di enzimi proteolitici:	<5%
solventi, stabilizzanti, conservanti	5-15%
NON CONTIENE FOSFORO	

Avvertenze

Il concentrato è nocivo per ingestione- Irritante per la pelle – Rischio di gravi lesioni oculari – Può provocare sensibilizzazione per inalazione - In caso di contatto con gli occhi lavare subito ed abbondantemente con acqua e consultare il medico- usare guanti adatti e proteggersi gli occhi. Conservare lontano da fonti di calore.

Attenzione: Dialzima New non è un disinfettante. PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE

Confezioni

FM0681 flaconi da 1000 ml in cartoni da 12 pz



Accessorio di Dispositivo medico disinfettante ad impiego professionale per la disinfezione di strumentario chirurgico o dispositivi medici. D.M. Accessorio rientrante nella classe IIB secondo la direttiva 93/42/CEE e succ. integrazioni (Dir 2007/47/CE

Prodotto da: **MONDIAL snc** via Don G. Zonta, 3 - 35010 Limena PADOVA - tel 049768712 - fax 049769497

Le informazioni qui contenute si basano sulle nostre conoscenze, alla data sopra riportata. Si riferiscono al preparato indicato e non costituiscono una specifica o una garanzia di particolare qualità. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che intende fare.