

## FENOCID

PO292  
11/03/10

### Dispositivo medico disinfettante

#### Proprietà

Disinfettante virucida concentrato per la disinfezione dei dispositivi medici riutilizzabili e di superfici lavabili in ambienti ospedalieri. Agisce anche in presenza di sostanza organica residua. I principi attivi sono formulati in modo da esplicare la loro massima attività biocida con la necessaria compatibilità verso i materiali.

#### Campi di impiego

Decontaminazione e disinfezione di dispositivi medici, quali strumenti e ferri chirurgici, loro accessori, vetrerie od oggetti a contatto con sostanze organiche, attrezzature sanitarie e superfici lavabili in genere presenti in ambito ospedalieri.

#### Caratteristiche chimico-fisiche

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Aspetto .....        | liquido ambrato                    |
| pH sol. 1% .....     | 10,0 ± 0,5                         |
| densità a 20°C ..... | 1,065 ± 1%                         |
| solubilità .....     | solubile in acqua in ogni rapporto |

#### Composizione (Reg. CE 648/2004)

100 g di prodotto contengono:

o-fenilfenolo g 11,4; p-tert-amilfenolo g 2,3; o-benzil-p-cloro-fenolo g 8,2  
tensioattivi anionici non ionici biodegradabilità sup al 90% e coformulanti q.b. a 100g

#### Dosi e Modalità di impiego

FENOCID viene diluito in acqua per produrre soluzioni decontaminanti virucide, disinfettanti, battericide, micobattericide e fungicide.

##### PER DISPOSITIVI MEDICI:

Azione decontaminante virucida (contro HIV, HBV, HCV) diluire allo 0,4% con tempi di contatto minimi di 10 minuti.

Azione battericida, micobattericida e fungicida diluire dallo 0,4% all'1%, con tempi di contatto variabili da 30 a 10 minuti. La decontaminazione può essere favorita da una azione fisica meccanica compatibile con il dispositivo medico. Effettuare un accurato risciacquo con acqua preferibilmente sterile dopo la disinfezione. Non impiegare con dispositivi monouso e non esporre all'aria le soluzioni.

PER ATTREZZATURE SANITARIE: diluire FENOCID allo 0,4% per tempi di contatto di 30 minuti.

#### Uso professionale

#### Modalità di conservazione

conservare i contenitori chiusi al riparo dalla luce e da fonti di calore.

#### Avvertenze

Il concentrato è corrosivo e pericoloso per l'ambiente. Provoca ustioni.

In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico; in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. Proteggersi gli occhi e la faccia; usare indumenti protettivi e guanti adatti; Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Non disperdere nell'ambiente. Non utilizzare con dispositivi monouso

Dispositivo medico disinfettante ad impiego professionale per la disinfezione di strumentario chirurgico o dispositivi medici. D.M. rientrante nella classe IIB Direttiva 93/42/CEE e succ. mod. e integr.



#### Confezioni

FM0532 flaconi da litri 1 x 12 pezzi

FM0533 taniche da litri 5 x 4 pezzi

FM0534 buste da 50 ml x 60 pezzi

Prodotto da: **Mondial snc** via Don G. Zonta, 3 – 35010 Limena (Padova)- ITALY- Tel 049768712

Le informazioni qui contenute si basano sulle nostre conoscenze, alla data sopra riportata. Si riferiscono al preparato indicato e non costituiscono una specifica o una garanzia di particolare qualità. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che intende fare.



**snc** – Via Don G. Zonta, 3 – 35010 Limena Z.I. (Padova) - ITALY  
Tel. +39 049 768712 Fax +39 049 769497 e-mail: info@mondialprod.it

Sistema di Gestione Qualità Certificato  
UNI EN ISO 9001:2000  
UNI EN ISO 13485:2008