


Allegato 5

MODALITA' DI CONFEZIONAMENTO DEI CAMPIONI BIOLOGICI AI FINI DEL TRASPORTO

1. I campioni dovranno essere posti in un box a triplo involucro il quale dovrà riportare il Barcode dei medesimi campioni;
2. Il box, a sua volta, dovrà essere inserito in apposito sacchetto di plastica;
3. Il sacchetto di plastica, dovrà infine, essere inserito nella borsa termica con il necessario materiale refrigerante;
4. Dovrà essere prevista una duplice etichettatura sia sulla box che sul sacchetto di plastica:

ETICHETTA N.1 “ In caso di danneggiamento o di perdita avvisare immediatamente la mittente azienda/ struttura sanitaria”,

ETICHETTA N.2 “  “ etichetta di orientamento da apporre sui due lati.

Verbale redatto in quattro copie:

*struttura sanitaria mittente *trasportatore *laboratorio destinatario (da inserire nel contenitore termico) *autorità richiedente